

Руководство по эксплуатации

Сшивающая система Signia™



1. Установка и зарядка




Покажите основание рукоятки с электропитанием.



Первая активация: зарядите рукоятку с электропитанием не менее трех часов перед клиническим использованием. О том, что аккумулятор полностью заряжен, покажет горящий зеленый светодиод.



Снимите ручку с электропитанием с зарядного устройства.

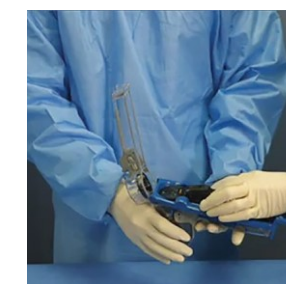

Перед началом операции: Поместите стерилизованную направляющую для введения в открытый корпус с электропитанием. В процессе операции: Вставьте рукоятку с электропитанием в корпус электропитанием и снимите многократно направляющую для вставки.




Закрывайте корпус с электропитанием до тех пор, пока не услышите звуковое и тактильное подтверждение того, что защелка полностью закрыта.



Убедитесь, что все три верхних зажима нажаты.


3. Загрузите перезаряжаемую кассету

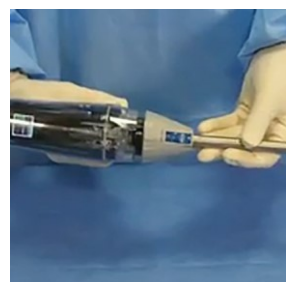


Совместите проксимальный конец адаптера с кнопкой БЫСТРОГО РАЗЪЕДИНЕНИЯ по направлению вверх. Сожмите два компонента вместе, пока адаптер полностью не сядет в рукоятку степлера.



Убедитесь в подключении линейного адаптера с помощью идентификатора состояния степлера на экране дисплея.

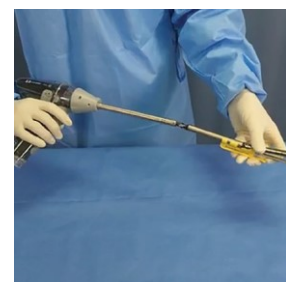

Убедитесь, что индикатор выравнивания ЗАГРУЗИТЬ на кассете совпадает с индикатором выравнивания ЗАГРУЗИТЬ на адаптере.

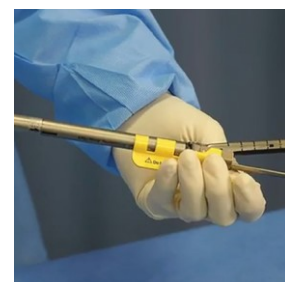


Вставьте кассету в адаптер и поверните по часовой стрелке. Убедитесь, под ним нет красного цвета. Удалите транспортировочный фиксатор.



Выполните проверку цикла перезарядки:

- Нажмите и удерживайте тумблер ВНИЗ до полного закрытия браншей
- Нажмите и удерживайте тумблер ВВЕРХ до полного закрытия браншей.

По завершении рукоятка покажет, что кассета загружена и готова к использованию.

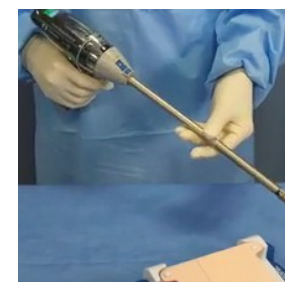

Закройте бранши кассеты, нажав и удерживая кнопку ВНИЗ.




Вставьте инструмент в полость тела пациента. Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ, чтобы открыть бранши инструмента. Для закрытия браншей – нажмите на кнопку ВНИЗ.



Нажмите и отпустите кнопку БЕЗОПАСНОСТИ. Обратите внимание: раздастся звуковой сигнал и светодиодный индикатор начнет мигать зеленым, указывая на включение режима ПРОШИВАНИЕ.



Чтобы ПРОШИТЬ нажмите и удерживайте на тумблере кнопку ВНИЗ/ПРОШИВАНИЕ, пока нож не достигнет дистального конца и прошивание не завершится. Для втягивания лезвия: нажмите и отпустите на тумблере кнопку ВВЕРХ. Для открытия браншей: после прошивания нажмите и удерживайте на тумблере кнопку ВВЕРХ до полного открытия.

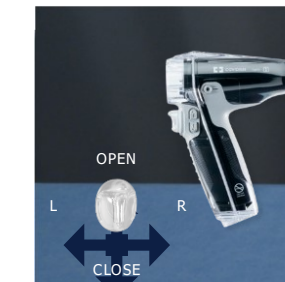


Оцентрируйте артикулирующие бранши кассеты одним из способов:

- Используя четырехпозиционный переключатель АРТИКУЛЯЦИИ на тумблере
- Нажав на тумблере кнопку ВВЕРХ на две секунды

Примечание: во время извлечения бранши кассеты закроются благодаря пружинному механизму.


5. Снятие кассеты

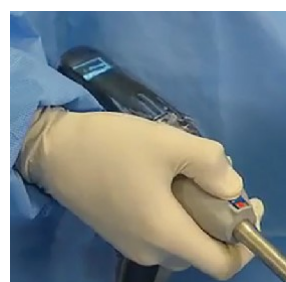

Снятие кассеты: Когда артикуляция отцентрирована и бранши инструмента открыты, потяните синюю кнопку РАЗРЯДИТЬ назад, чтобы снять кассету.




Поверните кассету против часовой стрелки до разблокировки (примерно на 45 градусов).

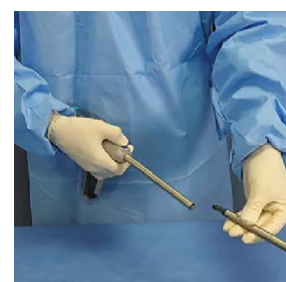

Извлеките кассету из адаптера.



Нажмите и удерживайте кнопку БЫСТРОГО РАЗЪЕДИНЕНИЯ, одновременно снимая адаптер с рукоятки степлера.

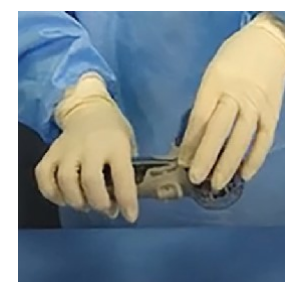

Откройте корпус с электропитанием, отпустив два боковых зажима.



Придерживая заднюю часть корпуса с электропитанием, нажмите на нижнюю защелку, чтобы открыть корпус с электропитанием.



В чистых перчатках осторожно извлеките рукоятку с электропитанием из корпуса с электропитанием.



Утилизируйте использованный корпус с электропитанием. Предупреждение: корпус с электропитанием нельзя стерилизовать после использования.

4. Как прошивать

7. Снятие корпуса и рукоятки с электропитанием